



# INTERPRÉTATION DU RESULTAT ETHYLOTEST A USAGE UNIQUE TAUX 0.2

Pour pratiquer le test, attendre 10 minutes après la dernière ingestion d'alcool.

***Pour interpréter, se référer au temps indiqué sur la notice avant de lire le résultat du test :***

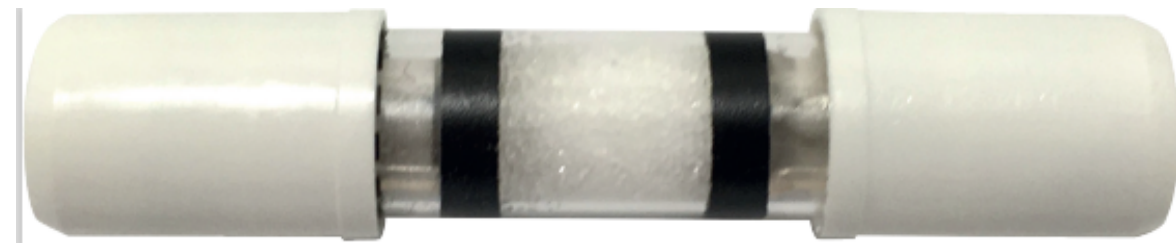

- Si la coloration reste blanche, le résultat du test est négatif, votre alcoolémie est inférieure à 0.10 mg/L d'air.

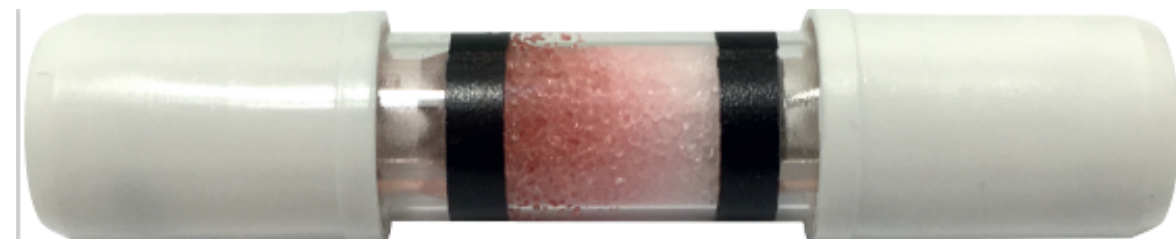

- Si la coloration des cristaux devient rouge, le résultat du test est positif, votre alcoolémie est supérieure ou égale à 0,10 mg/L d'air.

***VOUS NE DEVEZ PAS CONDUIRE***