

Test salivaire 5 drogues

Référence : NARCOCHECK5

17,88 €TTCProduit remplacé par [le test salivaire DRUGDIAG 5 DROGUES](#)

Le dépistage salivaire de drogues **NARCOCHECK** est le dispositif le plus fiable du marché.

Portatif et très simple d'utilisation, il permet de dépister 5 classes de substances stupéfiantes:

- Cannabis (THC)
- Cocaïne (COC)
- Opiacés (OPI)
- Amphétamines (AMP)
- Méthamphétamines (MET)

Avec le NARCOCHECK, vous pouvez de manière simple et rapide, via une analyse de la salive, réaliser en toute fiabilité des contrôles de présence de stupéfiants.

Il est compact, rapide, économique et ne nécessite pas d'alimentation électrique.

- Manipulation intuitive et instructions simples
- Contrôle clairement visible grâce aux lignes de contrôle et de test dans la fenêtre de résultats

Le dispositif de dépistage de substances NARCOCHECK se compose de deux éléments :


- un collecteur absorbant pour recueillir un échantillon de fluide oral
- une cassette de test pour l'analyse.

Le test s'effectue en trois étapes faciles :

- A l'aide de l'écouvillon, frotter pendant 3 minutes toutes les parois de la bouche ainsi que la langue
- Insérer l'écouvillon dans le dispositif
- Attendre 10 minutes avant de lire les résultats

Interprétation des résultats :

- Le test est positif lorsque qu'une ligne rouge disparaît en face d'une des lettres (ou plusieurs). Cela veut dire qu'il a détecté la présence de drogue = lire la lettre correspondante à la drogue détectée.

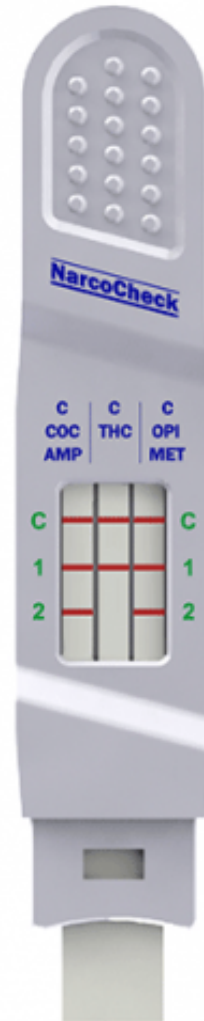



MY PHARMACIE BOX

6b rue du Plessis Beuscher
35220 CHATEAUBOURG
FRANCE
02 21 010 010

- Le test est négatif lorsque lorsque la (ou les) ligne rouge reste visible. Aucune trace de drogue n'a été détectée.
- Le test doit être refait avec un autre dispositif si les lignes rouges disparaissent en face des deux C (cela veut dire que le protocole n'a pas été respecté)

Le test ne prend pas plus de 15 minutes.

Dispositif à usage unique

Produit remplacé par [le test salivaire DRUGDIAG 5 DROGUES](#)



samedi 16 mai 2026 00:57